

VRP1 Flutter

PHZNR.: 5467599

Klein, mobil
und effektiv

Atemtherapiegerät zur Sekret-Mobilisierung

Der **VRP1 Flutter** ist ein kleines, leichtes Atemtrainingsgerät mit sekretmobilisierender Wirkung. Aufgrund der geringen Größe kann das Gerät immer und überall einfach verwendet werden. Die Anwendung selbst erfordert keinen Kraftaufwand.

Während der Ausatmung des Anwenders in den **VRP1 Flutter** beginnt eine im Inneren befindliche Stahlkugel zu vibrieren, da sie durch den Ausatemdruck an der Trichterwand hochgedrückt wird. Durch die entstehende Öffnung entweicht Luft, der Ausatemdruck sinkt und die ausströmende Luft wird beschleunigt. Die Vibration wird zurück in die Lungen geleitet, wodurch sich in den Atemwegen befindlicher Schleim löst und nach der Anwendung abgehustet werden kann. Durch Änderung des Neigungswinkels kann die Geschwindigkeit der Vibration und der Gegendruck beim Ausatmen in den **VRP1 Flutter** verändert werden.

Ein Atemzyklus wird ca. 10 bis 15-mal wiederholt. Eine Trainingseinheit dauert somit zwischen 5 und 10 Minuten. Der **VRP1 Flutter** wird bei verschiedenen Atemwegserkrankungen zur Mobilisierung von Schleim verwendet, z.B. bei COPD oder bei Cystischer Fibrose.

Die Vorteile auf einem Blick

- ▶ Kleines, kompaktes und tragbares Gerät
- ▶ Befreit die Atemwege von zähem und festsitzendem Bronchialschleim
- ▶ Geringe Kosten für eine optimale Behandlung
- ▶ Einfach zu reinigen durch einfaches Waschen
- ▶ Einfach und überall verwendbar
- ▶ Kurze Anwendungsdauer für maximale Effektivität

