


# OXYNASOR

Kombisonde für nasale  
und orale Sauerstoff-  
Insufflationstherapie

Bestellnr. HLM27001



Die Kombisonde (ausgenommen Schlauch) kann ausgekocht oder im Autoklav (121°C) bzw. Geschirrspüler gereinigt werden.

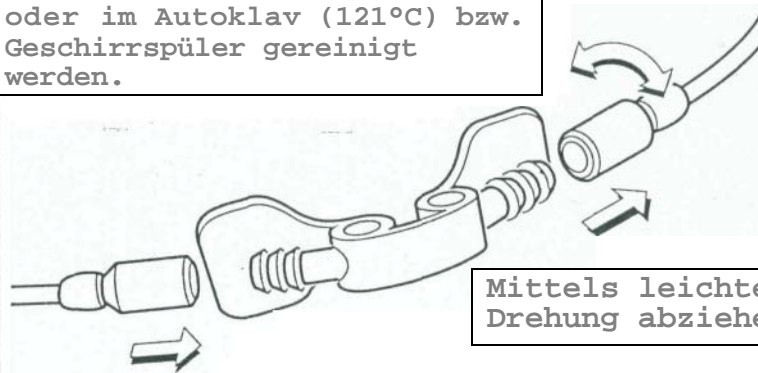

Mittels leichter  
Drehung abziehen

Nach erfolgreicher Reinigung  
wieder anstecken

Vertrieb durch:  
Ferdinand Menzl Medizintechnik GmbH  
Donaufelderstraße 199  
A-1220 Wien  
T: +43 (1) 2558960-0  
F: +43 (1) 2558960-60  
M: [info@menzl.com](mailto:info@menzl.com)  
W: [www.menzl.com](http://www.menzl.com)