

ACAREX® TEST



Der Acrarex® Test ist ein Stäbchentest, der mit einer Farbreaktion die Hausstaubmilbenbelastung in Staubproben anzeigt.

Diese Staubproben werden einfach mit Hilfe eines Staubsaugers und des Acarex-Feinstaub-Sammlers separat von jedem textilen Gegenstand gewonnen. Ausserdem können Sie den Staub direkt aus der Kammer oder dem Beutel Ihres Staubsaugers entnehmen. Dafür sollte, je nachdem welches Model Sie benutzen, entweder ein neuer Beutel verwendet werden oder die Kammer des Staubsaugers sauber sein.

Packungsinhalt:

- 10 x Aluminiumbeutel mit Testflüssigkeit
- 1 x Dosierlöffel
- 1 x Röhrchen mit 10 Teststreifen
- 1 x Feinstaubsammler (Kunststoffröhrchen, Befestigungsband u. Kunststoffkappe)
- 1 x Farbskala

Anwendung:

1. Zur Gewinnung von allergenhaltigem Hausstaub wird der Staubsammler mit Hilfe des Papierstreifens im Staubsauger angebracht. Die Staubsammlerkappe zeigt dabei in das Staubsaugergehäuse. Die Matratze, die Polstermöbel oder den Teppich am besten mit einer kleinen Düse sorgfältig absaugen.
2. Der Staub wird aus dem Staubsammler entnommen. Die Staubgewinnung ist bei jedem zu untersuchendem Gegenstand neu auszuführen. D.h. der Staubsammler muss vorher immer gereinigt werden.
3. Ein Löffel mit Staub wird in die Vertiefung der Plastikbox geschüttet. Der gesamte Inhalt eines Beutels mit Testflüssigkeit wird zugefügt und anschließend umgerührt.
4. Der Teststreifen wird kurz eingetaucht und nach einer Minute mit der Farbskala auf verglichen.

Hinweise:

10 Einzeltests: zum Nachweis einer Hausstaubmilben-Belastung

Nicht zur Anwendung an Mensch und Tier

Für Kinder unzugänglich aufbewahren

Gebrauchsanleitung beachten

Bei 2 – 8°C lagern! Nicht gefrieren!