



Die aus **mikrobiologisch einwandfreiem Seidenfibroin** hergestellten **Slips** DermaSilk® INTIMO fördern die Balance und das Wohlbefinden im Genitalbereich. Klinische Studien haben gezeigt, dass sie **Reizungen, Juckreiz, Brennen und Schmerzen** in kurzer Zeit reduzieren und dass sie bei der **Behandlung und Prävention von Bakterien- und Pilzinfektionen wirksam sind**.  
 Dank der natürlichen Zusammensetzung (das Fibroin der Seide ist eine Protein, das unserer Haut sehr ähnlich ist) können sie auf allergischer und hyperreaktiver Haut verwendet werden und sind ideal während der Schwangerschaft.

Medizinprodukt der Klasse 1 EG



Dank ihrer Eigenschaften hat die Unterwäsche DermaSilk® INTIMO folgende Wirkungen:

- Sie reduziert Juckreiz, Brennen und Schmerzen, oft bis zur vollständigen Regression;
- Sie kontrolliert das Wachstum von Bakterien, Pilzen und Hefen auf dem Gewebe und bekämpft somit die Superinfektion;
- Sie fördert die Regeneration der Haut und der Schleimhäute;
- Sie hält den optimalen pH-Wert und das richtige Maß an Feuchtigkeit und Temperatur;
- Sie ermöglicht eine hohe Atmungsaktivität des Genitalbereichs;
- Sie absorbiert den Ausfluss, hindert die Entwicklung von Gerüchen und bleibt trocken.

FÜR DIE FRAU



• "ELITE"-REIHE

**Slips, Minislips, Brasilianische Slips, Shorts, Minishorts, BH und Tops** aus reinem Seidenfibroingarn.  
 Komfortabel und vielseitig tragbar.  
 Durch die Elastizität sowie das Fehlen von Nähten an der Seite und vom Gummizug am Beinausschnitt passen sie sich jeder Figur an.

Mit Zwickel aus Seidenpiqué.

ZUSAMMENSETZUNG: 96% Seidenfibroin - 4% hypoallergenes beschichtetes Elasthan. (100% reines Seidenfibroin in Kontakt mit der Haut).  
 Erhältlich in 3 Größen.

Größen XS/S (36-42); M/L (44-48); XL/XXL (50-56)

VERWENDUNG UND PFLEGE

Die Verwendung ist einfach, man braucht sie nur zu tragen

- Die DermaSilk-Produkte sind wirksam, wenn sie auf gereinigter und sauberer verwendet werden.
- Bei Ausfluss ist es ratsam, die Slips oft zu ersetzen.
- Die Verwendung von vaginalen Zäpfchen / Cremes schafft eine Barriere, die die Wirksamkeit des Produktes vermindert.

DermaSilk-Seide ist leicht zu waschen.

Handwäsche oder Maschinenwäsche bei 30° - 40° C im Schongang.

Bei Bedarf können die Kleidungsstücke bei 60° C im Schongang gewaschen werden.

DermaSilk®-Seide ist frei von Sericin und kann mit einem Schuss milden Shampoos (ohne Balsam oder andere Zusatzstoffe) oder mit einem Feinwaschmittel ohne Weichspüler, Fleckentferner, Chlor oder Desinfektionsmittel gewaschen werden.

Es ist wichtig, DermaSilk-Produkte wiederholt und sorgfältig zu spülen.

Nicht schleudern.

DermaSilk-Produkte sollen im Schatten getrocknet werden. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen. Nicht im Trockner oder im unmittelbaren Kontakt mit Wärmequellen (Heizkörper) trocknen.

Bei einer Temperatur von 30-40°C waschen

Nicht bleichen.

Das Kleidungsstück kann bei einer niedrigen Temperatur (maximal 100° C) gebügelt werden

Das Kleidungsstück kann trocken gereinigt werden.

Das Kleidungsstück darf nicht im Trockner getrocknet werden.



"BLACK"-SLIP

Vanisé-Gewebe (Innenteil: 100% reines Seidenfibroin in Kontakt mit der Haut. Außen: Schwarz gefärbtes Polypropylen. Kein Abfärben). Melierte Optik. Überzogener Gummizug an der Taille und am Beinausschnitt.

Erhältlich in 5 Größen.

Größen S (38-40); M (42-44); L (46-48); XL (50-52); XXL (54-56)



• LINIE "ELITE"

**Boxershorts** aus reinem Seidenfibroingarn. Bequem und vielseitig, ohne Nähte an der Seite.

ZUSAMMENSETZUNG: 96% Seidenfibroin - 4% hypoallergenes beschichtetes Elasthan. (100% reines Seidenfibroin in Kontakt mit der Haut). Erhältlich in 4 Größen.

Größen XS/S (40-44); M/L (46-50); XL/XXL (52-56); XXXL (58-60)



FÜR DEN MANN



• "ELITE"-REIHE

ZUSAMMENSETZUNG: 96% Seidenfibroin - 4% hypoallergenes beschichtetes Elasthan. (100% reines Seidenfibroin in Kontakt mit der Haut). Erhältlich in 2 Größen.

Größen I (3/6 Jahre) +/- 95/119 cm +/- 14/20 kg  
 II (7/10 Jahre) +/- 119/135 cm +/- 20/30 kg



JUNGEN MÄDCHEN



MADE IN ITALY

KAUFINFORMATIONEN

Die DermaSilk-Unterwäsche ist nicht in der Apotheke erhältlich, sondern:

DEUTSCHLAND: online [www.amazon.de](http://www.amazon.de)

ÖSTERREICH: online [www.dermasilk.at](http://www.dermasilk.at)

Telefon: 43(0)1255 89 60-0 - Fax: 43(0)1255 89 60-60  
**Offizieller Vertrieb:** Ferdinand Menzl Medizintechnik GmbH - Donaufelderstraße 199, A-1220 Wien

SCHWEIZ: online [www.allergycare.ch](http://www.allergycare.ch)

Telefon: 41(0)43 377 88 66 - Fax 41(0)43 377 88 68  
**Offizieller Vertrieb:** AllergyCare AG - Zürichstrasse 2, CH - 8134 Adliswil



# KLINISCHE STUDIEN BELEGEN DIE WIRKSAMKEIT

Nützlich bei:

- Kandidose
- Dermatitis und Dermatoze
- Vestibulitis
- Lichen sclerosus
- Lichen simplex chronicus
- Lichen ruber Planus
- Entzündliche Vulvitis
- Hautreaktionen auf Krebsbehandlungen
- Jucken im Intimbereich
- Brennen
- Schmerz
- Rötung
- Vulvitis bei Kindern

Die Wirksamkeit der Slips DermaSilk® INTIMO beruht auf der patentierten Technologie, die die Eigenschaften des Seidenfibroins mit einem dauerhaften antimikrobiellen Schutz kombiniert, der keine Substanz abgibt und somit die Haut und der Schleimhäute schont.

Der antimikrobielle DermaSilk®-Schutz ist wirksam, ohne die natürliche residente Hautflora zu verändern:

- **vermeidet** die Proliferation von pathogenen Mikroorganismen auf dem Gewebe;
- **eliminiert** pathogene Mikroorganismen von der Haut und den Schleimhäuten, die mit dem Gewebe in Kontakt kommen.
- **Die Wirksamkeit bleibt** dauerhaft und **unverändert** (beständig gegen Waschen).

Nachfolgend in Kürze die Ergebnisse der klinischen Studien, die die Wirksamkeit der Slips DermaSilk INTIMO® beweisen.

Mehr Informationen auf der Homepage [www.alpretec.com](http://www.alpretec.com)

**DermaSilk® bei REZIDIVIERENDER CANDIDIASIS.**  
Reduziert die Symptome und Wirkungen auch ohne antimykotische Therapie.

Vergleich zwischen den DermaSilk®-Slips und den Slips aus reiner Baumwolle bei der Behandlung von rezidivierenden Vulvovaginalkandidose ohne topische und orale medikamentöse Therapie.



**Ergebnisse in der DermaSilk®-Gruppe:**

> **Drastische Reduzierung aller Symptome und Anzeichen innerhalb von nur drei Monaten** (Siehe grafische Darstellung).

> **60% der Frauen hatten innerhalb von 6 Monaten der Beobachtung zwischen 0 und 1 Rückfall** (In den sechs Monaten vor Beginn der Studie, hatten sie 3 bis 6 Rückfälle).

Die Frauen aus der Baumwollgruppe hatten weder eine signifikante Verringerung der Symptome, noch eine Verringerung der Rückfälle.

D'Antuono A., Bellavista A., Gaspari V. et al., DermaSilk briefs in recurrent vulvovaginal candidosis. An alternative option in long-lasting disease. Minerva Ginecologica 2013.

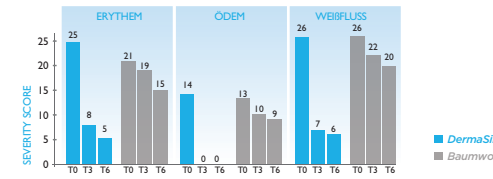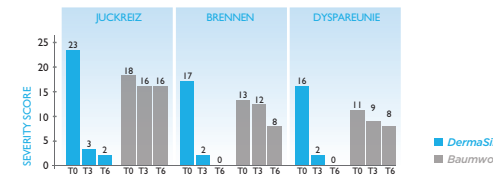

Severity Score von Symptomen und klinischen Zeichen, zu Beginn der Studie (T0), nach 3 Monaten (T3) und am Ende der Studie, nach 6 Monaten (T6), für die DermaSilk-Gruppe und für die Baumwollgruppe

**DermaSilk® bei LICHEN SIMPLEX CHRONICUS.**  
Reduziert Symptome und Kortisonverbrauch.

DermaSilk®-Slips verglichen mit Slips aus reiner Baumwolle bei der Bekämpfung vom vulvarem Lichen simplex chronicus (Dauer der Vergleichsstudie: 4 Wochen. In der Woche davor wurden die Patientinnen mit Mometasonfuroat behandelt).

**Ergebnisse in der DermaSilk®-Gruppe:**

- Deutliche Verbesserung der Symptome (Juckreiz, Brennen, Schmerzen) und der klinischen Zeichen.
- Längste Zeit ohne Symptome: 22,5 Tage in der DermaSilk-Gruppe (vs. 7,2 Tage in der Baumwollgruppe).
- Drastische Reduzierung des Kortisonverbrauchs.

Corazza M., Borghi A., Minghetti S., et al. Effectiveness of silk fabric underwear as an adjuvant tool in the management of vulvar lichen simplex chronicus: results of a double-blind randomized controlled trial. Menopause 2015.

**DermaSilk® bei ENTZÜNDLICHER VULVITIS.**  
Reduziert Symptome und Rückfälle.

Bei vorpubertärer wiederkehrender entzündlicher Vulvitis haben sich DermaSilk-Slips als nützlich erwiesen, sowohl bei infektiöser Vulvitis - in Kombination mit der Standardtherapie - als auch bei unspezifischer irritativer Vulvitis ohne medikamentöse Therapie.

**Ergebnisse**

- Nach 1 Monat: Alle Mädchen haben über eine Linderung des Juckreizes und Brennens berichtet.
- Nach 3 Monaten sind bei 90% der Mädchen die Läsionen vollständig verschwunden ohne jegliche Rückfälle.
- Nach 7 Monaten wurde die Abwesenheit von Symptomen und Rückfällen von 100% der Mädchen bestätigt.

Patrizi A., Giacomini F., Gurioli C. et al. Clinical effectiveness of a special silk textile in the treatment of recurrent pediatric inflammatory vulvitis: an open label pilot study. Giornale Italiano di Dermatologia e Venereologia 2011.

**INITIATIVE "Besserung oder Geld zurück".**

Wir haben die Wirksamkeit der Slips in kurzer Frist getestet, indem wir die ersten 100 Frauen, die zur Umfrage "Besserung oder Geld zurück" beigetreten sind, gebeten haben die **Verringerung der Symptome innerhalb von 1, 2, 7, 14 und 30 Tagen zu überwachen.**


Die Pathologien der betroffenen Frauen wurden wie folgt geteilt:

- > 32% wiederkehrende Vulvovaginalkandidose
- > 13% genitaler Lichen sclerosus
- > 9% genitale Dermatitis
- > 7% genitale Vestibulitis
- > 39% andere Störungen (z. B. Vulvodinia, unspezifischer intimer Juckreiz) oder eine Kombination von mehreren Krankheiten.

Die meisten Frauen, die die Unterwäsche "DermaSilk INTIMO" einen Monat lang verwendet haben, haben keine peroralen Medikamente genommen.

Hier sind einige der wichtigsten Ergebnisse der Umfrage, die nach 30 Tagen Dauereinsatz der Slips stattfand.

**GESAMTERGEBNIS (100 FRAUEN)**

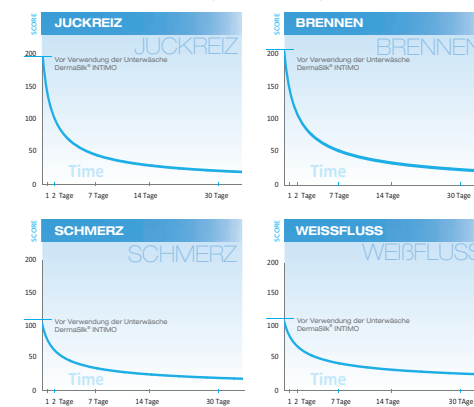

SCORE: die Summe der Punkte, die die Befragten den Symptomen zugeordnet haben (Skala von 0 bis 3: 0 = keine Symptome; 1 = milde Symptome, 2 = mäßige Symptome; 3 = schwere Symptome).

**DermaSilk® bei GENITALEM LICHEN SCLEROSUS.**  
Wirksam bereits innerhalb eines Monats.

DermaSilk®-Slips im Vergleich mit Slips aus reiner Baumwolle bei Frauen mit genitalem Lichen sclerosus (bei gleicher Standardtherapie).

**Ergebnisse in der DermaSilk-Gruppe:**

> **Innerhalb des ersten Monats drastische Reduzierung von Juckreiz, Schmerzen, Brennen, Trockenheit und Dyspareunie.**

> **Am Ende der Studie, fünf Monate später, war die Verbesserung in DermaSilk-Gruppe sogar noch ausgeprägter, in vielen Fällen sind die Symptome verschwunden.**

Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der Patienten, die das Symptom hatten / Markierung des Ergebnisses am Anfang der Studie und nach sechs Monaten.


SYMPTOME	DERMASILK GRUPPE		BAUMWOLL-GRUPPE		P (Fischer test)
	PATIENTEN AM BEGINN DER STUDIE	PATIENTEN NACH 6 MONATEN	PATIENTEN AM BEGINN DER STUDIE	PATIENTEN NACH 6 MONATEN	
JUCKREIZ	13	0	14	4	p<0,0001
SCHMERZ	20	0	19	16	p<0,0001
BRENNEN	21	9	21	21	
DYSpareunie	20	9	16	16	
OBJEKTIVE ANZEICHEN					
ERYTHEM	21	9	21	19	p<0,05

D'Antuono A., Bellavista S., Negasanti F. et al. DermaSilk Briefs in Vulvar Lichen Sclerosus: An Adjuvant Tool. Journal of Lower Genital Tract Disease 2011.

**Rezidivierende Vulvovaginalkandidose (32 Frauen)**

**JUCKREIZ**

Nach 1 Monat kontinuierlicher Verwendung der Slips DermaSilk® INTIMO, hatten **87%** der Befragten **keinen Juckreiz mehr.**

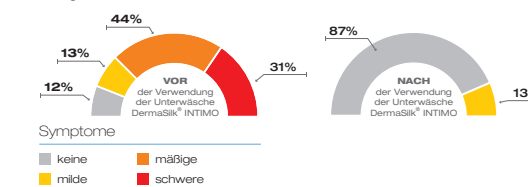

Ein Zeugnis:

"Dank der Slips "DermaSilk INTIMO" habe ich endlich ein Problem gelöst, das mich seit Jahren geplagt hat. Und das ohne Nebenwirkungen. Ob ich sie einer Freundin empfehlen würde? Ja! Schade, dass sie mir niemand früher empfohlen hat." (S.B. - Ravenna)

Die vollständigen Ergebnisse der Umfrage sind verfügbar unter: [www.alpretec.com](http://www.alpretec.com)

**DERMASILK®-SLIPS: VON GYNÄKOLOGEN EMPFOHLEN.**



Die Slips „DermaSilk INTIMO“ werden von der SIGO (Italienische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe) als eines der grundlegenden Produkte für die Behandlung von gynäkologischen Infektionen empfohlen.



MADE IN ITALY

Die Reihe DermaSilk INTIMO® ist Teil der therapeutischen Bekleidungsline von DermaSilk, die eine wertvolles Hilfsmittel bei der Behandlung von atopischer Dermatitis und anderer Hauterkrankungen darstellt (s. veröffentlichte klinische Studien).

Es ist ein Medizinprodukt der Klasse-I - EG, patentiert und hergestellt von ALPRETEC Srl, einem auf die Herstellung von High-Tech-Gesundheitsgeweben spezialisierten Unternehmen.

**KAUFEN IN DEUTSCHLAND:**

online [www.amazon.de](http://www.amazon.de)

**KAUFEN IN ÖSTERREICH:**

online [www.dermasilk.at](http://www.dermasilk.at)

Telefon: 43(0)1255 89 60-0 - Fax: 43(0)1255 89 60-60  
**Offizieller Vertrieb:** Ferdinand Menzl Medizintechnik GmbH - Donaufelderstraße 199, A-1220 Wien

**KAUFEN IN SCHWEIZ:**

online [www.allergycare.ch](http://www.allergycare.ch)

Telefon: 41(0)43 377 88 66 - Fax 41(0)43 377 88 68  
**Offizieller Vertrieb:** AllergyCare AG - Zürichstrasse 2, CH - 8134 Adliswil

**FEEDBACK DER KUNDEN**

"Ich litt unter häufigen Candida-Rezidiven, die sich mit ständiger Nutzung der DermaSilk-Slips erheblich vermindert haben; für mich war es eine große Erleichterung. Darüber hinaus sind sie auch sehr bequem: Man spürt sie gar nicht, als ob man sie gar nicht an hätte."

"Sie sind auch sehr bequem zum Waschen, und dann sind sie atmungsaktiver als normale Baumwolle ... Der Unterschied ist merkbar."

"Ich war damit recht zufrieden, denn nach den ersten Tagen ist mein Problem verschwunden. Ich leide an vielen Allergien, die intimen Juckreiz verursachen."

"Ich litt seit vielen Jahren an atopischer Kontaktdermatitis. Ich konnte nichts mehr tun. Mit DermaSilk geht es mir gut, mein Zustand hat sich verbessert."



**FEEDBACK DER KUNDEN**

"Ich war sicherlich zufrieden. Ich fand eine Lösung für mein Problem (Entzündung der Genitalien). Ich habe versucht, andere Unterwäsche aus extra-feiner Baumwolle zu tragen, aber mit DermaSilk fühle ich mich besser. Der Unterschied ist spürbar."

"Ich leide an Lichen sclerosus. Ich litt an schweren Wunden und Juckreiz ... Ich konnte nicht mit dem Fahrrad fahren ... und ich muss sagen, dass ich mich nach anderthalb Monaten gut fühle ... jetzt fahre ich mit dem Fahrrad."

"Die Slips sind wirksam, weil sich meine Probleme mit Lichen und Vestibulitis allmählich lösen."  
"Die DermaSilk-Slips? Sie haben mein Problem mit intimen Juckreiz vollständig gelöst!"