

# RESPRO® SportsTA-ANTI-ALLERGENMASKE

Für Tätigkeiten auf der Straße und im Gelände, insbesondere bei sportlichen Aktivitäten wie z.B. beim:

- Radfahren, Joggen, Skifahren
- Snowboarden, Klettern, Wandern
- Skateboarden, Motorradfahren
- Motocross, Reiten, Inline-Skaten
- etc.

Bietet Schutz gegen:

- Allergenpartikel (Pollen, Tierhaarallergene, Milbenallergene etc.)
  - Gebäudestaub
  - Ziegelstaub
  - Getreidestaub
  - Soyastaub
  - Kohlenstaub
- Andere Schadstoffe:
- Dieselgeruch
  - Blei
  - Teer

Die **Respro® Sportsta™** Maske vereinigt höchste Filterleistung bei Schadstoffen im Micron-Bereich, wie beispielsweise Pollenstaub, mit der leichten, belüfteten **Neotex™** Maske. Die hochentwickelten Sports-Ventile gehören zur Standardausrüstung der Maske und verhindern bei jeder Atmungsintensität, daß man zu wenig Luft bekommt. Die **Respro® Sportsta™** Maske ist eine voll durchlüftete Maske und bietet kühles Tragen sowie höchsten Schutz gegen Micron-große Schadstoffe.

ANLEITUNG ZUR ANPASSUNG:

1. Legen Sie die Maske an Ihr Gesicht und positionieren Sie diese bequem zwischen Nasenrücken und Kinn.
2. Befestigen Sie die Maske mittels der beiden Klett-Verschlüsse an der Rückseite Ihres Kopfes.
3. Formen Sie den Nasen-Clip an Ihren Nasenrücken, um gute Abdichtung zu erzielen.
4. Um die Anpassung zu überprüfen, wölben Sie beide Hände über die Maske (siehe Foto) und atmen Sie stark aus. Sollte Luft am Rand ausströmen, befestigen Sie die Maske stärker.
5. Durch verdrehen der Klettverschlüsse kann der Anpreßdruck der Maske auf Ober- oder Unterseite der Maske verlegt werden.

FILTER INFORMATION:

Der **Sportsta™** Filter funktioniert auf Basis elektrostatisch aufgeladener Kunstfasern, die durch elektrophysikalische Anziehung die feinsten (bis 0,3 Micron große) Partikel zurückhalten, wenn die Luft durch die Maske strömt. Die meisten anderen Filter arbeiten auf Basis rein mechanischer Filterung, was oft mit erschwerter Atmung und geringem Flow verbunden ist.

VORTEILE DES **Sportsta™** FILTERS:

- Der **Sportsta™** Filter hat, verglichen mit anderen Filtern, einen extrem geringen Einatemwiderstand.
- Die hypoallergene Beschichtung verhindert jede Hautirritation, die durch Staubpartikel während der Verwendung entstehen kann.
- Durch den „Docht“-Effekt wird Wasserdampf vom Gesicht wegtransportiert, wodurch die Filterinnenseite trocken und kühl bleibt.

1. Dieses Produkt ist nicht als Schutz gegen Asbeststaub und bei Lackiererarbeiten gedacht.  
2. Die Maske liefert keinen Sauerstoff! Entfernen Sie die Maske sofort, sollten Sie Probleme mit dem Atmen bekommen oder Sie durch einen anderen Umstand beunruhigt werden.  
ES LIEGT IM VERANTWORTUNGSBEREICH DES KÄUFERS, DASS DAS VORLIEGENDE PRODUKT FÜR DIE VORGESEHENE ANWENDUNG VERWENDET WIRD.

FILTERWECHSEL:

Der Filter sollte - je nach Verwendung - erneuert werden:

1. Wenn die Außenseite vom Staub und anderen Partikeln merkbar verfärbt ist.
2. Wenn der Filter Gerüche angenommen hat.
3. Wenn ein merkbarer Atemwiderstand zu spüren ist.

Filter können im Doppelpack nachgekauft werden. Sollten Sie Probleme mit der Beschaffung haben, kontaktieren Sie bitte Ferdinand Menzl Medizintechnik GmbH  
FON +43 (1) 2558960  
FAX +43 (1) 2558960-60  
MAIL: info@menzl.com  
WEB: www.menzl.com